

Händler

Möbelhandel Narjes
Aufstehsessel - Pflegesessel - Rehasessel
Kaisersbusch 1
D- 42781 Haan / Rheinland

Telefon: 02129 1287
Mobil: 0177 7287656
Internet: www.narjes.de
Internet: www.pflege-sessel.de
E-Mail: info@narjes.de



Bedienungsanleitung

Mondo Manuell

Modell Champ

Hersteller:

Medross Rehab B.V.
Veldweg 16
5447 BH Rijkevoort





Darf nicht im Hausmüll entsorgt werden



Konsultieren Sie der Bedienungsanleitung



Produktionsdatum



Hersteller



CE-Nummer



Seriennummer



Achtung



Nur für den Heimgebrauch



Artikelnummer



= Kg

Maximales Benutzergewicht



Aufsteigen verboten (Aufstehen oder Sitzen verboten)

WARTUNG ÜBERPRÜFUNG TRIPPELSTUHL

Typ:	Seriennummer:	Baujahr:
Grund der Wartung: jährlich/nach Reparatur/vor Wiederverwendung		
Allgemeine Sichtkontrolle:		In Ordnung:
Lassen sich alle beweglichen Teile leicht verstellen?		<input type="radio"/>
Gibt es beim Bewegen keine wackelnden oder klappernden Teile?		<input type="radio"/>
Gibt es beim Bewegen keine Schleif- oder Quietschgeräusche?		<input type="radio"/>
Gibt es keine verrosteten oder angerosteten Teile?		<input type="radio"/>
Sind keine Teile verformt oder verbogen?		<input type="radio"/>
Keine Risse an tragenden Teilen sichtbar?		<input type="radio"/>
Keine Verformung der Motorhalterung oder andere sichtbare Schäden?		<input type="radio"/>
Laufen die Räder leichtgängig?		<input type="radio"/>
Schwenken die Räder leichtgängig?		<input type="radio"/>
Ist das Motorgehäuse unbeschädigt?		<input type="radio"/>
Sind Schrauben und Bolzen angezogen?		<input type="radio"/>
Berühren nur die Räder den Boden?		<input type="radio"/>
Allgemeine Funktionsprüfung:		
Funktionieren die Bremsen der Räder richtig? (Bremsend/nicht bremsend)		<input type="radio"/>
Kann der volle Hub (auf/ab) gefahren werden?		<input type="radio"/>
Funktioniert die Sitztiefenverstellung?		<input type="radio"/>
Funktioniert die Rückenhöhenverstellung?		<input type="radio"/>
Sind die Armlehnen höhenverstellbar und rasten sie richtig ein?		<input type="radio"/>
Documentation:		
Ist die Bedienungsanleitung vorhanden?		<input type="radio"/>
Sind alle Aufkleber angebracht und lesbar?		<input type="radio"/>
Fehlerbeschreibung / Bemerkungen:		

OPTIONEN

Fußring



Achten Sie darauf, dass beim Auf-/Zuklappen des Fußrings keine Finger oder andere Körperteile eingeklemmt werden können.



Stellen Sie sicher, dass der Fußring vollständig heruntergeklappt/weggeklappt ist.



Stehen oder hängen Sie nicht am Fußring. Benutze sie nicht als Sprungbrett.

CE-ERKLÄRUNG

Hiermit erklärt der Hersteller, dass der Trippelstuhl aufgrund seiner Konstruktion und Konstruktion sowie in der von ihm in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der EG-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit nach einer Änderung des Gerätes, die nicht in Absprache mit dem Hersteller durchgeführt wird.

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte.

Der Trippelstuhl ist mit einem CE-Logo, der Adresse des Herstellers und einer Identifikationsnummer versehen.



INHALTSVERZEICHNIS

Buchseite

Vorwort	2
Lagerung und Transport	2
Anleitung	3
Vorwarnung	3
Rückenlehne einstellen	4
Sitztiefe einstellen	4
Sitzwinkel einstellen	5
Sitzhöhe einstellen	6
Einstellen des Bremshebels	7
Einstellen der Armlehnen	8
Anweisungen für die Wartung	9
Garantieinformationen	10
Störungen	10
Gebrauchsanweisung, Warnhinweise	11
Optionen	12
CE-Erklärung	12
Wartungsübersicht Trippelstuhl	13

VORWORT

Lieber Nutzer,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines Qualitätsprodukts von Medross Rehab BV. Diese Produkte haben ihre Zuverlässigkeit und Qualität im Laufe der Jahre bewiesen.

Sie sind nun Anwender eines hochwertigen Werkzeugs, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden.

Diese Gebrauchs- und Wartungsanleitung macht Sie mit Ihren Mondo Gasfeder-Trippehstuhl Modell Champ vertraut. Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch vollständig zu lesen, bevor Sie den Mondo Gasfeder-Trippehstuhl Modell Champ verwenden. Diese Anleitung beschreibt die optimale Nutzung und Wartung der Mondo Gasfeder-Trippehstuhl Modell Champ.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferant.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Der Mondo Gasfeder-Trippehstuhl lässt sich leicht transportieren und verstauen. Optional können die Einstellungen der Trippehstuhl genutzt werden, um die Abmessungen zu minimieren.

Lagerbedingungen: Temperatur: +10 °C bis +40 °C, Luftfeuchtigkeit 30 – 90 %, Luftdruck 700hPa bis 1060 hPa, direkte Sonneneinstrahlung und Kontaminationsgefahr vermeiden.

Erfolgt der Transport über einen kleinen Transportweg, kann dies nach dem Auspacken der Trippehstuhl ggf. mit Hilfe der eigenen Räder erfolgen.



Der Transportweg muss sauber und frei von Hindernissen sein, um Verschmutzungen und Schäden an den Rädern zu vermeiden.



ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG, WARNUNGEN

Befolgen Sie die Anweisungen wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Es wird vorausgesetzt, dass diese Bedienungsanleitung gelesen wurde und alle Warnhinweise vor jedem Gebrauch befolgt wurden.

Verwenden Sie den Trippehstuhl nur auf einer ebenen, horizontalen Fläche.

Eine andere als die vorgeschriebene oder bestimmungsgemäße Verwendung, wie das Sitzen auf der Armlehne, wird nicht empfohlen.

Der Bezug ist nicht beständig gegen scharfe Gegenstände.

Beim Ein- und Aussteigen in den Stuhl muss der Stuhl an der Bremse stehen.

Nur Originalzubehör einbauen. Bei Verwendung und/oder Montage von nicht originale Zubehör erlischt die Garantie ganz oder teilweise.

Werden Drehknöpfe, Innensechskantschrauben oder Griffe gelöst, um beispielsweise die Armlehnenhöhe zu verändern, müssen diese nach der Verstellung wieder festgezogen werden.

Bei Reklamationen bezüglich Ihren Trippehstuhl wenden Sie sich an den Lieferant. Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Garantie.

GARANTIEINFORMATIONEN

Medross Rehab BV gibt dem Erstkäufer die folgenden Garantien:

Material- und Konstruktionsfehler	60 Monaten
Bezug	12 Monaten
Räder	12 Monaten
Mechanik	12 Monaten

Die angegebenen Fristen gelten ab dem Datum der ersten Lieferung an den Verwender. Die Gewährleistung erlischt, wenn Reparaturen oder Veränderungen am Hilfsmittel durch andere als den Hersteller oder den Vertragshändler vorgenommen wurden.

Die Garantie erlischt auch bei:

- * unsachgemäßer, falscher oder anormaler Gebrauch
- * Nachlässigkeit
- * Vernachlässigung
- * jede Form von Gewalt
- * Verwendung und/oder Wartung, die nicht in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben ist.

Der Lieferant wird ggf. Teile ersetzen und/oder Reparaturen durchführen, sofern diese unter die Garantiebedingungen fallen.

FEHLER

- * Sitz fällt herunter: Gasfeder undicht
- * Sitz hebt nicht mehr: Gasfeder undicht

VORWORT

Dieser Mondo Gasfeder-Tripplstuhl Modell Champ besteht aus austauschbaren Komponenten. Dadurch kann ein Stuhl mit Standardkomponenten oder Anpassungen für Sie maßgeschneidert werden. Der Tripplstuhl ist für den Innenbereich konzipiert.

Achten Sie immer auf den physischen und psychischen Zustand des Benutzers, um das Risiko eines Einklemmens oder einer Verletzung zu minimieren.

Der Sitz wird in Absprache mit Ihnen von der bevollmächtigten Person angepasst, die Ihnen den Sitz ausliefert.

WARNUNG IM VORAUS



Dieses Symbol warnt vor einer möglichen Gefahr, die Anweisungen müssen daher unbedingt befolgt werden.

Der Tripplstuhl ist für maximal eine Person gedacht.

Achten Sie darauf, dass der Rollstuhl beim Hinsetzen/Aufstehen sowie beim Einstellen der Höhe immer an der Bremse steht.

Sie müssen sofort und leise auf dem Sitz Platz nehmen.

Das maximale Benutzergewicht beträgt 125 kg.


Stellen Sie sicher, dass beim Bewegen/Benutzen der Tripplstuhl keine Gegenstände, Tiere oder Personen eingeklemmt werden können. Achten Sie beim Verschieben oder Verstellen der Tripplstuhl darauf, dass sich niemand unnötig in der Nähe der Tripplstuhl aufhält. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen!

Verwenden Sie den Tripplstuhl nicht in einem nassen oder sehr feuchten Raum.

Stellen Sie sicher, dass der Stuhl nicht breiter ist als Ihre Türen.


RÜCKENLEHNE EINSTELLEN

Die Rückenlehne wird bei Lieferung separat im Karton geliefert. Legen Sie die Stange der Rückenlehne in die dafür vorgesehene Aussparung (1) hinter der Sitzfläche. Schieben Sie die Stange nach unten, bis die gewünschte Höheneinstellung erreicht ist. In der Regel ist dies die Höhenverstellung, bei der die Krümmung der Rückenlehne auf Höhe der natürlichen Rückenmulde etwas oberhalb des Beckens liegt. Achten Sie darauf, dass der Rückenbügel nicht zu niedrig ist, damit er beim Absenken des Sitzes mit dem Bremsbügel in Kontakt kommen kann. Ziehen Sie den Knopf (2) fest, um die Rückenlehne zu verriegeln.

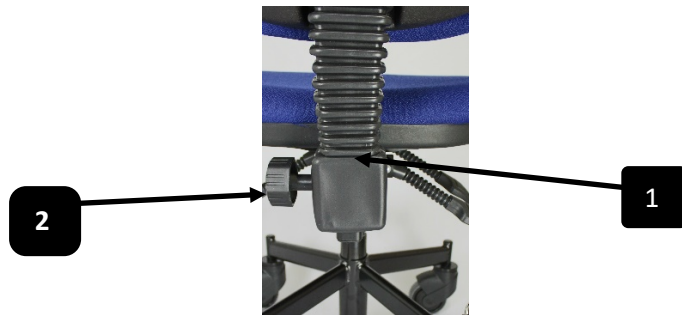

EINSTELLEN DER SITZTIEFE

Ziehen Sie den rechten hinteren Hebel (3) nach oben und bewegen Sie die Rückenlehne nach vorne/hinten, bis die richtige Sitztiefe erreicht ist. Drücken Sie dann den Hebel (3) wieder nach unten in seine ursprüngliche Position. Die eingestellte Sitztiefe ist nun fixiert.

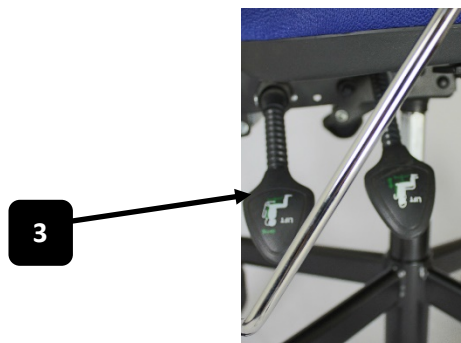

WARTUNGSHINWEISE

Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Trippelstuhl noch optimal funktioniert. Achte auf folgende Punkte:

Bremse

Die Bremse funktioniert gut. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Lieferant.

Bezug

Reinigen Sie Stoffpolster regelmäßig mit einer sauberen, glatten Staubsaugerdüse. Flecken können mit lauwarmem Wasser entfernt werden. Waschbare Polster können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Rahmen

Die Metallteile können regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Wasser, das in die mechanischen Teile gelangen kann.

Räder

Entfernen Sie regelmäßig Staub usw., der zwischen die rotierenden Teile des Rades gelangt.

Befestigungen

Kontrollieren Sie alle Drehknöpfe mindestens einmal im Monat. Prüfen Sie, ob sie noch fest sitzen.




Reparaturen und Anpassungen an den Produkten von Medross Rehab BV dürfen nur von von uns autorisierten Technikern durchgeführt werden.

EINSTELLEN DER ARMLEHNEN


Höheneinstellung:

Hebel (A) nach oben ziehen. Ziehen Sie die Armlehne nach oben oder unten, bis sich die Armlehne auf der gewünschten Höhe befindet. Lassen Sie nun den Hebel (A) wieder los. Auf der anderen Seite wiederholen.

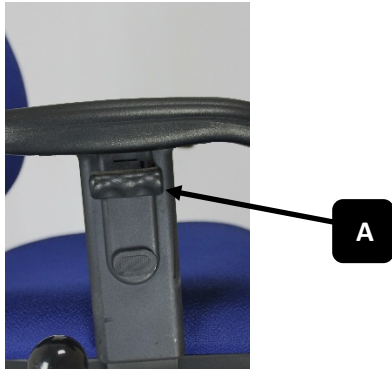

Breiteneinstellung:

Lösen Sie die 3 Schrauben (B) unter dem Sitz. Schieben Sie nun die Armlehne hinein oder heraus, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Ziehen Sie nun die 3 Schrauben (B) wieder fest. Auf der anderen Seite wiederholen.

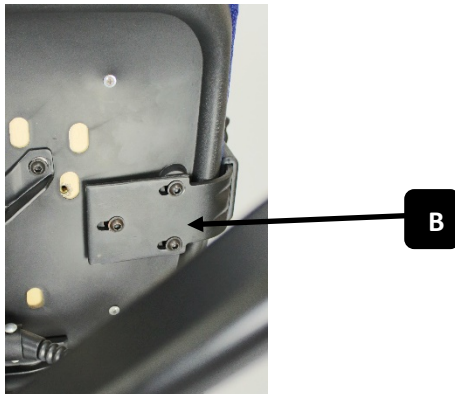

EINSTELLEN DES SITZWINKEL

Der Sitz hat einen variablen Sitzwinkel, sowohl nach vorne als auch nach hinten, wodurch diese Sitzwinkelverstellung auch hervorragend als zusätzliche Hilfe beim Aufstehen verwendet werden kann..

Um den Sitzwinkel einzustellen, ziehen Sie den linken Griff (4) nach oben.

Sie können den Sitz jetzt in die richtige Position bringen, indem Sie die Vorderseite des Sitzes nach oben/unten bewegen. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, drücken Sie den Griff (4) nach unten, damit der Sitz fixiert ist. Beim Aufstehen können Sie diesen Hebel nach oben ziehen. Der Sitz kippt dann nach vorne und erleichtert das Aufstehen.

Achten Sie beim Aufstehen darauf, dass der Stuhl auf der Bremse steht!




EINSTELLEN DER SITZHÖHE

Die Sitzhöhe ist über eine Gasfederverstellung verstellbar.

Anheben der Sitzhöhe:

Das mechanische Anheben der Sitzhöhe ist nur möglich, wenn Sie nicht im Stuhl sitzen.

Ziehen Sie den vorderen Griff (5) auf der rechten Seite nach oben. Die Gasfeder des Sitzes wird nun ausgekuppelt und der Sitz hebt sich. Sobald der Sitz die richtige Position erreicht hat, lassen Sie den Griff los. Der Sitz ist jetzt auf der eingestellten Höhe fixiert.

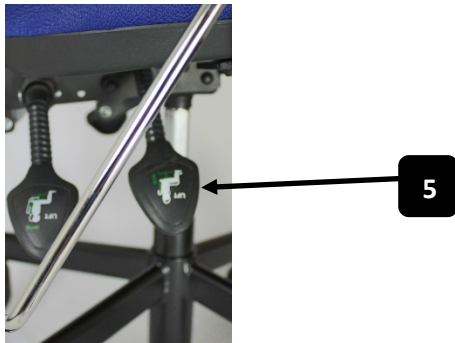

Abensen der Sitzhöhe:


Ziehen Sie den Griff (5) nach oben, während Sie einfach auf dem Sitz sitzen. Der Sitz bewegt sich nun mit Ihrem Körpergewicht nach unten. Wenn Sie die gewünschte Sitzhöhe erreicht haben, lassen Sie den Griff los. Der Sitz ist jetzt in der richtigen Höhe fixiert.

EINSTELLEN DES BREMSHEBELS

Die Hinterräder der Trippelstuhl sind mit einer Zentralbremse ausgestattet. Der Bremshebel ist in der Breite verschiebbar und sowohl links als auch rechts bedienbar.

Links/Rechts-Einstellung:

Lösen Sie die Inbusschraube (B). Jetzt können Sie den Bremshebel schwenken. Inbusschraube (A) lösen. Schieben Sie den Bremsbelag auf die gewünschte Seite und ziehen Sie ihn wieder fest. Schwenken Sie den Bremshebel in die richtige Position vor sich und ziehen Sie die Inbusschraube (B) wieder fest.

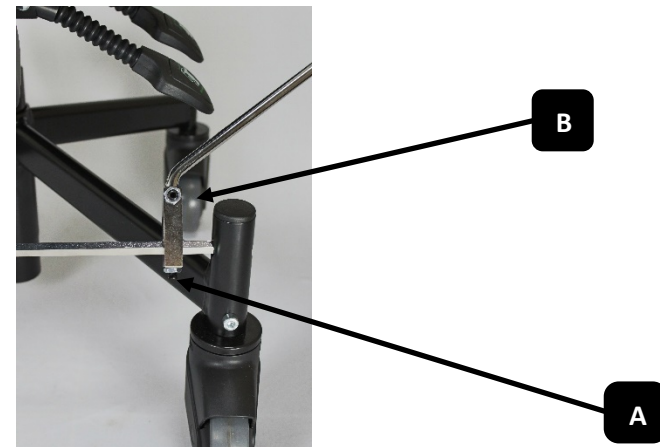

Breiteneinstellung:

Lösen Sie die Inbusschraube (A). Schieben Sie nun den Bremshebel nach links oder rechts, bis er sich frei entlang der Armlehne bewegen kann. Ziehen Sie nun die Inbusschraube wieder fest. Die Bremswirkung ist am optimalsten, wenn der Sitz auf einer ebenen Fläche steht. Eine unebene Oberfläche kann die Bremsleistung stark beeinträchtigen.

WICHTIG:

Bevor Sie sitzen/stehen oder die Stuhlhöhe ändern, ziehen Sie immer die Bremse am Stuhl an!