

Der Fitform ZEN Pflegesessel ist mit einer 3-Tasten-Kabelhandbedienung ausgestattet, über die alle Funktionen des Sessels einfach zu steuern sind. Nachfolgend beschreiben wir die **Bedienung durch die Pflegekraft / die Aufsichtsperson**.

Hinweis: die Slow Motion Schaukelbewegung stoppt automatisch nach 30 Min. Falls gewünscht, kann die Schaukelbewegung durch Drücken der unteren Taste an der Handbedienung wieder aktiviert werden.

Änderung des Benutzerprofils

Dieser Sessel verfügt über 4 einstellbare 'Benutzerprofile'. Jedes Profil besteht aus einer individuellen Kombination von Bewegungsabläufen. Die Pflegekraft kann in jeder Situation entscheiden, welches Profil der aktuellen Anforderung am besten gerecht wird. Die 4 LED Lampen auf der linken Taste der Handbedienung zeigen das eingestellte Profil an.




Profil A	der Sessel fährt weit zurück	vollständige Aufstehfunktion
Profil B	der Sessel fährt <i>weniger weit zurück</i>	vollständige Aufstehfunktion
Profil C	der Sessel fährt weit zurück	eingeschränkte Aufstehfunktion
Profil D	der Sessel fährt <i>weniger weit zurück</i>	eingeschränkte Aufstehfunktion

Das Benutzerprofil kann nur angepasst werden, wenn keine Person im Sessel sitzt. Das Umstellen ist einfach: Halten Sie beide weißen Tasten gedrückt. Der Sessel fährt in die Neutral-Position und das Benutzerprofil kann mit Hilfe der aufleuchtenden LED Lampen bestimmt werden. Lassen Sie die Tasten los, sobald die LED Lampe des gewünschten Benutzerprofils aufleuchtet. Das Profil ist nun geändert.




Änderung der Geschwindigkeit der Slow Motion Schaukelbewegung

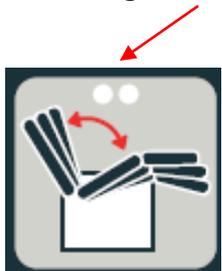

Oberhalb der Taste für die Slow Motion Schaukelbewegung befinden sich 2 LED Lampen. Leuchtet die linke Lampe, so ist die 'langsame' Schaukelbewegung eingestellt. Die rechte Lampe leuchtet, wenn die 'schnellere' Schaukelbewegung aktiviert ist. Das Umstellen der Geschwindigkeit ist einfach: Halten Sie hierfür gleichzeitig eine der beiden nebeneinander liegenden Tasten (egal welche) sowie zusätzlich die untere "Schaukel-Taste" gedrückt, bis die LED-Lampe der gewünschten Geschwindigkeit aufleuchtet. Lassen Sie nun die Tasten los. Die gewünschte Geschwindigkeit ist nun aktiviert.



Sperrern und entsperren der Funktionen

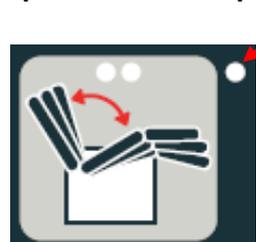

Auf der Rückseite der Rückenlehne, hinter dem Reißverschluss, befindet sich - befestigt an einem elastischem Band - ein spezieller 'Magnetschlüssel'. Hiermit können Sie den Sessel einfach sperren und entsperren. Streichen Sie mit dem Magnetschlüssel in Höhe der LED-Lampe – rechts neben der unteren Taste - mit einer sanften Bewegung von unten nach oben über die Handbedienung. Der Sessel stoppt direkt jede Bewegung ungeachtet in welcher Position er sich befindet. Um den Sessel wieder zu entsperren, wiederholen Sie diesen Vorgang. Alle Funktionen stehen nun wieder zur Verfügung.



Verhalten bei Störungen

1. Falls die Slow Motion Schaukelfunktion bei Tastendruck nicht arbeitet, prüfen Sie ob der Sessel sich evtl. in leichter Aufstehposition (oberhalb Sitzposition) befindet. Aus Sicherheitsgründen kann diese Funktion nicht im Aufstehmodus ausgeführt werden. Drücken Sie die rechte Taste ('Bewegung nach Hinten') bis die Beinstütze etwas herausgefahren ist. Betätigen Sie jetzt erneut die 'Schaukel-Taste'. Sollte die Schaukelfunktion noch immer nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit ihrem Fachhändler auf.
2. Falls der ZEN-Pflegesessel nicht ordnungsgemäß funktioniert oder gar keine Reaktion zeigt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Handbedienung für 5 Sek. und stecken Sie dann den Netzstecker wieder in die Steckdose. Das System führt dadurch ein "Reset" durch. Die Funktionsstörung sollte behoben sein.
3. Wenn nicht, können Sie das System manuell zurücksetzen (nur möglich wenn sich keine Person im Sessel befindet).
Schritt 1: Drücken Sie **alle drei Tasten** gleichzeitig für 10 Sekunden. Sie hören ein Signalton.
Schritt 2: Drücken Sie dann gleichzeitig die **beiden oberen Tasten**. Der Sessel kippt nach hinten. Warten Sie, bis der Sessel die äußerste Neigungsposition erreicht hat. Der Sessel piept weiter.
Schritt 3: drücken Sie die **linke obere Aufstehtaste**, bis sich der Sessel in der Neutralposition befindet (Sessel vollständig auf dem Boden und Rückenlehne vollständig aufrecht). Der Sessel piept weiter.
Schritt 4: Drücken Sie die **untere graue „Schaukel-Taste“**, bis Sie einen einzelnen abweichenden Piepton hören. Die sogenannte 0-Position ist nun gespeichert. Warten Sie, bis der Signalton nicht mehr ertönt. Der Sessel befindet sich nun wieder im 'Normalmodus' und ist einsatzbereit.

Grüne Pfeile: Funktionen die der Nutzer und die Pflegekraft bedienen können
Blaue Pfeile: Funktionen die die Pflegekraft für den Nutzer einstellen kann

