

Reset und Einstellen ZEN Pflegesessel

System Reset

Schritt 1: überprüfen Sie alle Kabel und alle Verbindungen.

*Schritt 2:*ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

*Schritt 3:*drücken Sie eine beliebige Taste auf der Handbedienung für 5 Sek. und stecken Sie dann den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Manueller Reset

Ein manueller Reset beim ZEN Pflegesessel ist nur möglich, wenn sich **keine Person im Sessel** befindet!

*Schritt 1:*drücken Sie **alle drei Tasten** für 10 Sekunden. Sie hören ein Signalton.

*Schritt 2:*drücken Sie dann gleichzeitig die **beiden oberen Tasten**.

Der Sessel kippt nach hinten. Warten Sie, bis der Sessel die äußerste Neigungsposition erreicht hat. Der Sessel piept weiter.

*Schritt 3:*drücken Sie die **linke obere Aufstehtaste**, bis sich der Sessel in der Neutralposition befindet (Sessel vollständig auf dem Boden und Rückenlehne vollständig aufrecht). Der Sessel piept weiter.

*Schritt 4:*drücken Sie die **untere graue „Schaukel-Taste“**, bis Sie einen einzelnen abweichenden Piepton hören.
Die sogenannte 0-Position ist nun gespeichert. Warten Sie, bis der Signalton nicht mehr ertönt. Der Sessel befindet sich nun wieder im 'Normalmodus' und ist einsatzbereit.



Sollte der Sessel erneut eine Fehlfunktion aufweisen, ist wahrscheinlich ein Motor oder die Steuereinheit defekt. Bitte wenden Sie sich an den Händler, der Ihren Fitform-Sessel geliefert hat.

ZEN Pflegesessel verriegeln und entriegeln

Schritt 1: bringen Sie die Handbedienung zum **Magnetschlüssel** hinter dem Reißverschluss.

Schritt 2: bewegen Sie den Magnetschlüssel in einer sanften Bewegung von unten nach oben über die Oberfläche der Handbedienung. Der Sessel stoppt direkt jede Bewegung, ungeachtet in welcher Position er sich befindet. Die **LED-Lampe** rechts neben der Schaukel-Taste leuchtet; der Sessel ist verriegelt.

Schritt 3: um den Sessel wieder zu entriegeln, wiederholen Sie diesen Vorgang. Alle Funktionen stehen nun wieder zur Verfügung. Die LED-Lampe leuchtet nicht mehr.

