

Information Akku-Systeme

Der Vorteil eines Akku-Systems (Batterie-Systems)

Dank des Akku-Systems haben Sie kein störendes Netzkabel mehr. Um sicherzustellen, dass Ihr Fitform-Sessel mit Batterie-System dauerhaft funktioniert, ist es wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig befolgen.

Welche Akku-Systeme gibt es?

Es gibt 2 unterschiedliche Akku-Systeme, mit denen Ihr Fitform-Sessel ausgestattet werden kann. Diese Systeme unterscheiden sich durch die verwendete Handbedienung Ihres Sessels und das zugehörige Ladekabel. In der folgenden Übersicht wird für jedes System erläutert, zu welcher Handbedienung und Ladekabel es gehört. Außerdem finden Sie klare Gebrauchsanweisungen und Hinweise.

Unabhängig davon, mit welchem System Ihr Sessel ausgestattet ist, ist es immer wichtig, dass der Akku rechtzeitig aufgeladen wird. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Akku-System sofort nach Lieferung 12 Stunden lang aufzuladen. Der Sessel kann während des Ladevorgangs normal benutzt werden. Auch in anderen Situationen, in denen der Sessel längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. während eines Urlaubs), ist es ratsam das Akku-System sofort aufzuladen, wenn Sie den Sessel wieder in Betrieb nehmen.

Akku-System Ciar

Die Wichtigkeit des rechtzeitigen Ladens

Mit diesem System ist das Laden immer möglich, jedoch ertönt ein Piepton, wenn der Akku fast leer ist. Nach dem Signalton müssen Sie das System für ca. 6 Stunden aufladen.

Lademethode

1. Suchen Sie den Anschluss für das Ladekabel. Dies ist ein runder Stecker (siehe Foto) und kann - je nach Sesseltyp - an folgenden Positionen gefunden werden:
 - a. hinter dem Reißverschluss auf der Rückseite der Rückenlehne
 - b. an der Unterseite der Armlehne
2. Verbinden Sie den Stecker des separat mitgelieferten Ladekabels (mit Bodentransformator) mit dem Stecker im Sessel und dann mit dem Stromnetz (Steckdose). Jetzt wird das Akku-System aufgeladen, während der Sessel wie gewohnt benutzt werden kann.
3. Das Akku-System ist nach ca. 6 Stunden aufgeladen.
4. Sie können das Ladekabel weiterhin an das Stromnetz anschließen. Das Akku-System dient dann als "Backup", wenn die Stromversorgung in Ihrer Heiminstallation unterbrochen ist.

Wichtig zu berücksichtigen

1. Bei diesem System stoppt der Sessel **immer** in der Neutralposition, wenn er von der Aufstehposition in die Entspannungsposition wechselt, oder wenn er von die Entspannungsposition in die Aufstehposition wechselt.



Handbedienung bei Akku-System Ciar

Ladekabel und Bodentransformator bei Akku-System Ciar

2. Bei diesem System wird die Beinstütze Ihres Sessels automatisch eingefahren, wenn sich der Sessel in Aufstehposition (bei etwa 5 cm Höhe) befindet. Wenn sich der Sessel in Aufstehposition höher als ca. 5 cm befindet, kann die Beinstütze nicht mehr ausgefahren werden.

Akku-System LINAK

Die Wichtigkeit des rechtzeitigen Ladens

Mit diesem System ist das Laden immer möglich, jedoch ertönt ein Piepton, wenn der Akku fast leer ist. Nach dem Signalton müssen Sie das System für ca. 6 Stunden aufladen.

Lademethode

1. Suchen Sie den Anschluss für das Ladekabel. Dies ist ein rechteckiger Stecker (siehe Foto), der sich hinter dem Reißverschluss auf der Rückseite der Rückenlehne befindet.
2. Verbinden Sie den Stecker des separat mitgelieferten Ladekabels mit dem Stecker im Sessel und dann mit dem Stromnetz (Steckdose). Jetzt wird das Akku-System aufgeladen, während der Sessel wie gewohnt benutzt werden kann.
3. Das Akku-System ist nach ca. 6 Stunden aufgeladen.
4. Sie können das Ladekabel weiterhin an das Stromnetz anschließen. Das Akku-System dient dann als "Backup", wenn die Stromversorgung in Ihrer Heiminstallation unterbrochen ist.

Wichtig zu berücksichtigen

1. Bei diesem System stoppt der Sessel automatisch in der Neutralposition, wenn er von der Aufstehposition in die Entspannungsposition wechselt. Der Sessel stoppt nicht automatisch in der Neutralposition, wenn er von der Entspannungsposition in die Aufstehposition wechselt.



*Handbedienung bei
Akku-System LINAK*

*Ladegerät und Ladekabel
bei Akku-System LINAK*